



CoaguChek[®] XS

Controle preciso do INR: Melhores resultados clínicos

CoaguChek® XS

Benefícios do Controle do INR na sua Mão

Excelente correlação
com método laboratorial ($r=0,988$)^{1,2}

Armazenamento das tiras em
temperatura ambiente (18°C a 32°C)

Controle de Qualidade
integrado à tira

Sem interferência à heparina na transição
para o anticoagulante oral³



Programação
da faixa terapêutica

Reagente com ISI = 1

Aplicação de apenas 8µL na parte
superior ou lateral da tira

Resultado em 1 minuto



1. Insira a tira no
equipamento.



2. Realize a punção do dedo
para obter a amostra de
sangue, após ter realizado
aspepsia.



3. (Aguarde o aviso de
colocar a gota de sangue,
que aparece no visor)
Aplique a primeira gota de
sangue na parte superior
ou lateral da tira.



4. Resultado: Em apenas 1
minuto você tem o valor
do INR.

Estudos demonstram que os doentes em auto controle da anticoagulação oral apresentam maior segurança de resultados e melhoras na eficácia da terapia em relação aos doentes em monitorização convencional.¹



MAIS INDEPENDÊNCIA

O teste pode ser realizado
quando e onde
o paciente quiser.



MAIS SEGURANÇA

50% de redução relativa de
tromboembolismo.¹
36% de redução relativa de mortalidade.¹



MAIS CONFIANÇA

Resultados de elevada qualidade,
comparáveis com os resultados de
laboratório.²

Ref 1. Ana MACEDO et al, Estudo de avaliação do custo incremental da auto-monitorização de INR..., Acta Med Port. 2010; 23(2):203-212; 2. Method Comparisons with Different Laboratory Thromboplastins performed in Study LB 110-2004 3. Folheto Informativo. Concentrações de heparina não fracionada (UFH) até 1 UI/ml, heparina de baixo peso molecular (LMWH) até 2 UI actividade antifactor Xa

CoaguChek®
Because it's my life

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729, prédio 38
São Paulo, SP, 05321-010, Brasil
0800 77 20 295

