



Accutrend Plus

*Glicose, Colesterol, Triglicérides e Lactato.
Num único equipamento!*



cobas[®]
Life needs answers

▶ 3 etapas simples para obter resultados precisos

Etapa 1

Ligue o equipamento e faça a codificação com a tira código. Após a codificação introduza a tira teste, sem sangue. Um sinal aparecerá no visor indicando a próxima etapa, a aplicação da amostra de sangue.



Etapa 2

Abra a tampa frontal do equipamento e aplique a gota de sangue capilar (ponta de dedo) na área amarela da tira. Você pode aplicar o sangue com a tira inserida no equipamento ou retirá-la para aplicar o sangue fora e inserir a tira novamente.



Etapa 3

Feche a tampa e aguarde a contagem regressiva até o aparecimento do resultado no visor.



▶ Accutrend Plus - Menu de Testes

Accutrend Plus

Faixas de Medição					
Testes	mg/dl	Tempo de Medição	Amostra	Volume de Amostra	Temperatura Ideal de Funcionamento
Glicose	20-600	12 seg	- Sangue capilar (ponta de dedo)	15-50 µl	18° - 32°C
Colesterol	150-300	180 seg	- Sangue capilar (ponta de dedo) pode ser utilizado capilar heparinizado para coleta	15-40 µl	18° - 30°C
Triglicérides	70-600	máximo 180 seg	- Sangue capilar (ponta de dedo) pode ser utilizado capilar heparinizado para coleta	10-40 µl	18° - 30°C
Lactato	0.8-22mmol/l	60 seg	- Sangue capilar (ponta de dedo) pode ser utilizado capilar heparinizado para coleta	15-50 µl	5° - 35°C

COBAS e LIFE NEEDS ANSWERS são marcas registradas Roche.

Accutrend Plus - Reg. ANVISA 10287410740.

Os reagentes comercializados no Brasil estão devidamente registrados. Para obter a relação dos números de registro ligar 0800 77 20 295.

©2016 Roche - Março 2016 - ERDL522

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729, prédio 38
São Paulo, SP
05321-010, Brasil
0800 77 20 295